


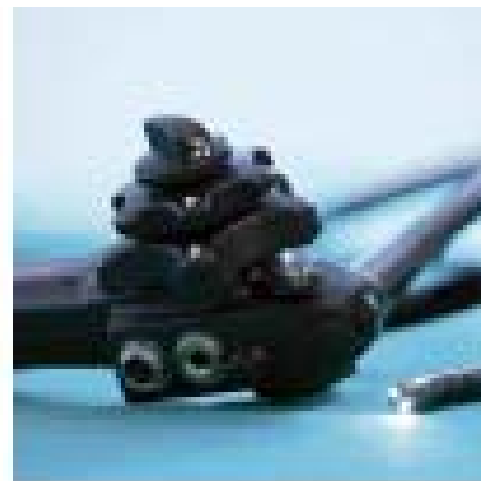

Sekusept[®] Aktiv


POEDERVORMIG HIGH LEVEL
INSTRUMENTENDESINFECTIEMIDDEL
MET REINIGENDE WERKING.

- ▲ Krachtige reiniger
- ▲ Breed werkingsspectrum
- ▲ Volgens RKI en VAH aanbevelingen



Sekusept[®] Aktiv

POEDERVORMIG HIGH LEVEL
INSTRUMENTENDESINFECTIEMIDDEL MET REINIGENDE
WERKING.

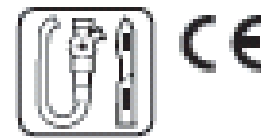

Eigenschappen

Voordelen

Breed werkingspectrum	Actief tegen bacteriën, sporen, gisten en virussen
Schuimarm	Zeer geschikt voor het wassen van endoscopen in semi-automatische wasmachines
Krachtige reiniger	Ook geschikt bij sterk vervuilde instrumenten
Goede compatibiliteit	Veilig voor flexibele endoscopen, instrumenten vervaardigd uit staal, rubber en plastic materialen. Eveneens geschikt voor dentale prothesen
Gebruiksvriendelijk	<ul style="list-style-type: none"> - Korte inwerktijd - Lage toepassingsconcentratie - Teststrookjes ter controle van de werking - Stofvrij granulaat

TOEPASSING

Desinfectie en reiniging van medische instrumenten zoals flexibele endoscopen, instrumentarium vervaardigd uit staal en rubber – plastic materialen voor anesthesie, urologie en chirurgie. Tevens geschikt voor dentale prothesen. Niet geschikt voor instrumenten vervaardigd uit messing of koper of mechanisch bewerkte instrumenten van chroom of nikkel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het aanmaken van de 2 %-oplossing, gebruik maken van de ingesloten maatbeker (30 ml = 20 g). Neem de nodige hoeveelheid water, voeg 20 g Sekusept Aktiv per liter water toe en roer meerdere malen de oplossing. Het instrumentarium en anesthesiemateriaal in de oplossing leggen en zorgen voor volledige onderdompeling. Na 15 min. de instrumenten uit de oplossing nemen en met water van minstens drinkwaterkwaliteit (beter is nog gedestilleerd water of gedemineraliseerd water) < 30°C afspoelen. De oplossing dagelijks verversen.

Bij zwaar vervuilde oplossingen of bij zeer hoge temperaturen kan men de werkzaamheid van de oplossing controleren d.m.v. Sekusept Aktiv teststrips.

SAMENSTELLING

Natriumpercarbonaat, fosfonaat, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, parfum.

VERPAKKING / REFERENTIE

Emmer : 6 kg
Verpakking : 1 x 6 kg
Ref. : 3050570

Het actieve bestanddeel perazijnzuur wordt gevormd na oplossen van het poeder met water. Een oplossing van 2 % bevat meer dan 1000 ppm perazijnzuur.

INFORMATIE


Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Sekusept[®] Aktiv

POEDERVORMIG HIGH LEVEL
INSTRUMENTENDESINFECTIEMIDDEL MET REINIGENDE
WERKING.

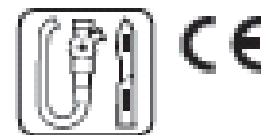

Werkingspectrum	Conc %	Inwerktijd
Instrumentendesinfectie volgens VAH (DGHM) Schone & vuile condities : Bactericide werking volgens EN13727 Gistendodend volgens EN13624 EN14561 EN14562	1 % 2 %	60 min 5 min
Instrumentendesinfectie volgens DGHM Schone & vuile condities : Tuberculocide werking volgens EN 14348, EN 14563	1 % 2 %	60 min 5 min
Sporicide werking volgens EN13704	2 %	15 min
Clostridium difficile	2 %	5 min
Virucide werking volgens EN14476	1 % 2 %	60 min 10 min

20 g = 30 ml 10 g = 15 ml
1 % = 10 g/L 2 % = 20 g/L

Producten



Toebehoren



Service



Garantie



Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com