



Productinformatie

De **BIONIX OORCURETTES MET VERLICHTING** - voor éénmalig gebruik - zijn een combinatie van 'Safe Oor Curettes' met een **krachtige LED lichtbron** en een **vergrotingslens** (loupe).

Deze gecombineerde functionaliteiten resulteren in een **efficiëntere en gebruiksvriendelijkere werkwijze** om cerumen op een veilige en voorzichtige manier te verwijderen.

- de **lichtbron** en de **loupe** zijn **minstens 50 keer herbruikbaar**.
- de **transparante curettes** zijn voor **éénmalig gebruik**.
- de curette op de lichtbron plaatsen **activeert de verlichting**, licht schakelt automatisch uit wanneer de curette wordt verwijderd.

VERLICHTING EN LOUPE

- **helder wit LED licht** tot in het uiterste punt van de curettes.
- de loupe - met bevestigingsclip - zorgt voor **vergroting** waardoor het risico op beschadiging van het oorkanaal aanzienlijk wordt verminderd.
- dankzij de ingebouwde verlichting en het vergrootglas is het niet nodig om een otoscoop als externe lichtbron te gebruiken.
 - hierdoor heeft u één hand vrij om het hoofd of het oor van uw patiënt te positioneren.

PATIËNTENCOMFORT EN VEILIGHEID

- safe ear curettes zijn gemaakt van **glad, flexibel polypropyleen**.
- ze zijn **ontworpen om te buigen** wanneer ze een obstakel tegenkomen, in tegenstelling tot harde, onbuigzame roestvrijstalen curettes.
- patiëntencomfort en veiligheid: het risico op pijn of beschadiging van de gehoorgang of het trommelvlies is nihil.
- éénmalig te gebruiken curettes **verminderen het risico op kruisbesmetting** en elimineren sterilisatiekosten.

TOEPASSING

- concave tip van 2,5 mm gebogen in hoek van 45° - Zeer geschikt voor **hard, geïmpacteerd cerumen en vreemde voorwerpen**.