

# Osmose systeem v. Midmark autoclaaf



Art: 9307297 | Merk: MIDMARK



## Productinformatie

Het OSMOSE OF DEMINERALISATIE SYSTEEM voor Midmark autoclaaven zorgt ervoor dat u **kalk- en mineralenvrij water** gebruikt wanneer uw sterilisator aangesloten is op de waterleiding. TIJD EN GELD SPAREN

- Het aansluiten van een autoclaaf op de waterleiding betekent voor u **geen gesleep met bussen gedemineraliseerd water**.

### AANSLUITING

- Bij aansluiting van uw stoomsterilisator op de **waterleiding is een osmose unit een must**.
- Het gezuiverde water wordt doorgestuurd naar de autoclaaf.
- Als veiligheid is ook een aansluiting voor waterafvoer nodig.

### OSMOSE PATRONEN

- De osmose patronen moeten **periodiek vervangen worden**.
- De frequentie van de vervanging hangt af van de hardheid van het water en de frequentie waarmee u uw instrumenten steriliseert.
- De autoclaaf **geeft zelf aan** wanneer de waterinput onvoldoende zuiver wordt en de patronen aan vervanging toe zijn.

### WATERVERZACHTER ALLEEN NIET VOLDOENDE

- Zelfs met een waterverzachter **blijft de osmose unit hoe dan ook nodig**.
  - Een waterverzachter levert namelijk niet dezelfde kwaliteit als gedemineraliseerd water.
  - Wel gaan de osmose patronen meer dan een jaar mee.